



COMAR

Pressure Garments
& Silicones.

מדריך מדידות לביגוד לחץ

פברואר 2023



הסברים כלליים

מדריך זה נבנה בתשומת לב רבה על מנת לתת את מרב ומיטב ההסברים למדידת המטופל, כהכנה לתפירת חבישת לחץ המתאימה ביותר לצרכיו, אך יחד עם זאת לפשט את ההסברים לנוחיותכם.

הקפדה על רישום מדויק של הפרטים והמידות תעזור לנו להימנע מתיאומים מיותרים בטלפון המעכבים את הכנת החבישה.

ולכן חשוב לנו מאוד:

- בהזמנה ראשונה עבור מטופל - יש למלא את כל הפרטים בדף הראשון. סימון מדויק ככל האפשר של אזור הפגיעה, רישום מין, גיל, שם מלא, כתובת, טלפונים, תאריך ונסיבות הפגיעה, שם מטפל, מרכז רפואי, אחריות לתשלום - אנא בכתב ברור וקריא. דף זה יש למלא רק בהזמנה הראשונה.
- בהזמנה חוזרת - יש למלא את מספר המטופל במקום המיועד לכך. אם המדידות זהות להזמנה הקודמת אין צורך לפרטן אלא לסמן במקום המתאים בחלק התחתון של טופס המדידות המתאים - "REORDER". אם יש שינויים במדידות יש למלא את טופס המדידות במלואו.
- רישום מדויק וסימון הפריט המבוקש בעיגול על גבי טופס המדידות.
- במידה ומטופל מבקש לבצע שינויים בבגד, לאחר שכבר נלבש - ובתקופת האחריות - נשמח לעשות זאת, נא בקשו לכבס את הבגד לפני העברתו אלינו.
- אחריותנו לשלמות הבגד בשימוש על פי ההוראות הינה 6 שבועות מתפירתו. לאחר תקופה זו אין באפשרותנו לבצע תיקונים מפאת התיישנות הבד וקיבוע חוטי התפירה בצורה שלא ניתנת לפרימה.
- בכל התלבטות במהלך המדידות אתם מוזמנים להתייעץ איתנו.

ראש מסכה

מדידות היקף

- 1 מתחילת הסנטר לפני האוזניים עד לקצה הראש.
- 2 מעל הגבות בקו ישר.
- 5 בשקע בין הסנטר לשפתיים בקו ישר לעורף כשהראש במנח טבעי.
- 6 היקף מרכז הצוואר.

מדידות אורך

- 3 צמוד לפנים בין העיניים לתחילת האוזן.
 - 4 צמוד לפנים מקצה האף לתחילת האוזן.
 - 7 מתחילת הסנטר ועד לסוף החבישה.
 - 8 אורך כל האוזן השמאלית.
 - 9 בקו ישר מקצה עין אחת לקצה העין השנייה.
 - 10 בקו ישר בין העיניים.
 - 11 אורך כל האוזן הימנית.
 - 12 מקצה הסנטר בקו ישר עד לקצה הגבה העליון.
 - 13 מקצה הסנטר בקו ישר לקצה העין.
 - 14 מקצה הסנטר בקו ישר לקצה תנוך האוזן.
 - 15 מקצה הסנטר בקו ישר לבסיס האף.
 - 16 מקצה הסנטר בקו ישר לקצה השפתיים.
 - 17 מקצה אחד של השפתיים בקו ישר לקצה השני.
 - 18 רוחבו של בסיס האף בקו ישר.
 - 19 היקף האף בחלקו הרחב.
 - 20 מקצה האף לתחילתו.
- מדידות 12,13,14,15,16 מומלץ לעשות עם סרגל ישר המונח על ספר צמוד לסנטר.

חבישת סנטר

- P-106 - ללא אוזניים המידות הנדרשות הינן 1,2,5,6,7,16,17
P-104 - כולל אוזניים המידות הנדרשות הינן 1,2,5,6,7,8,11,15,16,17

P-1008/1

פלג גוף עליון

ידיים

מדידות אורך

מידות 8 ו-25 נמדדות מהנקודה המקבילה לבית השחי ועד לאמצע המרפק בצד החיצוני של הזרוע - לקבלת המרווחים יש לחלק את התוצאה ב-3.
מידות 4 ו-29 נמדדות מאמצע המרפק ועד לשורש כף היד בצד החיצוני של האמה - לקבלת המרווחים יש לחלק את התוצאה ב-4.

מדידות היקף

מידות 1 עד 10 ו-23 עד 32 יש למדוד עפ"י המרווחים שהתקבלו ממדידות האורך (במהלך המדידות הידיים במנח נייטרלי).

חזה

מידות 11 ו-22 יש להעביר את הסרט מתחת לבית השחי ולהוריד את היד למנח נייטרלי ולמדוד את ההיקף בקו ישר כלפי מעלה על עצם האקרומיון.
מידה 12 נמדדת מעצם האקרומיון ועד לבסיס הצוואר.
מידה 13 נמדדת באמצע הצוואר.
מידה 14 נמדדת צמוד לגוף מבסיס הצוואר ועד לקו בית השחי.
מידה 16 נמדדת צמוד לגוף מבסיס הצוואר ועד לאמצע הדרך בין 14 ל-18 בגברים וילדים (אצל נשים עד תחילת קו החזה).
מידה 18 נמדדת צמוד לגוף מבסיס הצוואר ועד לקו המותניים.
מידה 20 נמדדת צמוד לגוף ממידה 19 ועד לסוף הבגד.
מידות 15, 17, 19, 21 הינן מידות היקף ומומלץ לסמן את מיקומן לפני מדידת מידות האורך.
אצל נשים יש להוסיף את היקף החזה מעל קו הפטמות וכן את מידת החזייה.

תוספות למדידת שרוול עם FLAP

מידה 12 נמדדת צמוד לגוף בין מידה 10 לאקרומיון.
מידה היקפית 14 נמדדת מהאקרומיון מעבר לבית השחי הנגדית וחזרה לאקרומיון.

כף היד

כפפה

מדידות היקף

- 1 בסיס האגודל לחלק הרחב בצד הנגדי.
- 2 מעל מפרקי MCP.
- 3,8,9,14 על מפרקי ה-PIP.
- 4,7,10,13 על מפרקי ה-DIP.
- 16 על מפרקי ה-IP.
- 17 באגודל נמדדת בצמוד ומעל ל-MP.
- 22 נמדדת בחלקו הצר של שורש כף היד.
- 23 נמדדת בסיום הכפפה.

מדידות אורך

- 5,6,11,12,15 נמדדות מה-WEB ועד לסיום האורך הנדרש בכל אצבע.
- 18 נמדדת משורש כף היד במעט אלכסון ל-WEB האגודל. הדבר נעשה בקו ישר בצמוד לגב כף היד.
- 19,20,21 נמדדות כל אחת בניצב משורש כף היד ועד ל-WEB. הדבר נעשה בקו ישר בצמוד לגב כף היד.
- 24 המרחק בין שורש כף היד לסיום הכפפה (בדר"כ 4 ס"מ).

GAUNTLET

סיום הגאונטלט הוא בגובה ה-MP.
המידות הנדרשות הינן 1,15,16,17,18,22,23,24.

ציור כף היד

ציור מדויק של כף היד על הטופס המיועד לכך ייעשה תוך שימוש במילוי של עט כשהוא בניצב לדף. על היד להיות צמודה לדף כששורש כף היד מונח על הקו המקווקו, אצבע 3 בקו ישר עם האמה והאצבעות אינן פשוקות על מנת לא ליצור הטיה אולנרית המשפיעה על מדידות האורך של ה-WEBS. עם סיום הציור נא לחזור על הקווים בהדגשה על מנת שנוכל לראות את הקווים במעבר בפקס.

P-1008/3.

פּלג גוף תחתון

מכנס

- 1 נמדדת במותן.
 - 2 נמדדת בחצי הדרך שבין מידה 1 למידה 3.
 - 3 נמדדת בחלק הרחב ביותר בישבן.
 - 36 נמדדת בצמוד לצד הגוף ממידה 1 למידה 2.
 - 37 נמדדת בצמוד לצד הגוף ממידה 1 למידה 3.
 - 38 נמדדת בצמוד לצד הגוף ממידה 1 למידה 35.
 - 39 נמדדת בצמוד לצד הירך מסוף הישבן/תחילת הרגל ועד לאמצע הברך.
את התוצאה של 39 יש לחלק ל-4 חלקים שווים ולמדוד את מידות **31,32,33,34,35** בהתאמה.
 - 40 נמדדת בצמוד לצד השוק מאמצע הברך ועד לסוף המכנס.
את התוצאה של 40 יש לחלק ל-5 חלקים שווים ולמדוד את מידות **26,27,28,29,30** בהתאמה.
 - 26 נמדדת מקיעור העקב בקו אופקי.
 - 25 נמדדת מקיעור העקב בקו אלכסוני.
 - 24 נמדדת מקיעור העקב בקו אנכי.
 - 23 נמדדת ב-2/3 האורך של מידה 20.
 - 22 נמדדת בבסיס האצבעות.
 - 20 נמדדת בקו ישר על הרצפה מתחילת העקב ועד לבסיס הבוהן.
 - 21 נמדדת מבסיס הבוהן ועד לסופה.
- כשנדרשת הארכה מעל המותן מוספת מידה **42** הנמדדת בצמוד ובצד הבטן עד לסוף החבישה וממנה נמדדת מידת היקף **41**.

P-1008/4

גרב וכפפת רגל

גרב

(בסוגריים מידות רגל שמאל)

- 13 קביעת נק' תחילת הגרב ומדידת האורך צמוד לשוק עד למידה 6.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 נמדדות חלקן או כולן בהתאם לאורך שנקבע במידה 13.
6 (19) נמדדת מקיעור העקב בקו אופקי
7 (20) נמדדת מקיעור העקב בקו אלכסוני.
8 (21) נמדדת מקיעור העקב בקו אנכי.
9 (22) נמדדת ב-2/3 האורך של מידה 12 (25).
10 (23) נמדדת בבסיס האצבעות.
11 (24) נמדדת מבסיס הבהון לקצה הבהון.
12 (25) נמדדת מתחילת העקב לבסיס הבהון.

לכפפה לרגל P-424

יש להוסיף על המדידות:

- א. שרטוט מדויק של כף הרגל כולל אצבעות עד ל-WEB בכל אצבע (שימוש במילוי לעט המוחזק באנך לדף). לאחר הציור נא לחזור על הציור בעט מודגש על מנת שנראה את הקווים במעבר בפקס. ציור זה הינו הכרחי לביצוע הגרב ובלעדיו לא ניתן לבצעה.
- ב. מדידת היקפי אצבעות הרגל, באזור הרחב שלהן.

P-1008/5.1